



Kopfband für Quha Zono X

Benutzerhandbuch



Kopfband für Quha Zono X

Das Kopfband für Quha Zono X ermöglicht das Tragen der Maus Quha Zono X auf dem Kopf des Benutzers. Es beinhaltet ein einstellbares Kopfband sowie eine magnetische Halterung zur Befestigung der Quha Zono X. Die Breite des Kopfbandes ist von S bis XL einstellbar.


Das Kopfband für Quha Zono X verfügt über einen Anschluss für einen externen Schalter von 3,5 mm. Ein optionaler externer Schalter kann für Klicks mit der linken Maustaste verwendet werden.



Montage

Das Kopfband für Quha Zono X wird in zwei Teilen geliefert: das Kopfband und die magnetische Halterung.

Drücken Sie für die Montage des Kopfbandes für Quha Zono X das Kopfband in den Anschluss auf der magnetischen Halterung, bis es vollständig eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung, wie in der Abbildung auf Seite 2 gezeigt, korrekt eingesetzt wird.

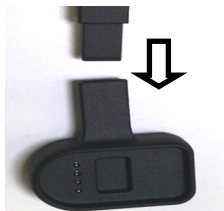

Die Breite des Kopfbandes kann an die Benutzer angepasst werden.



Sie können die Maus Quha Zono X entweder vor oder nach dem Platzieren des Kopfbandes auf Ihrem Kopf mit der magnetischen Halterung verbinden. Sie können die Maus entweder vor oder nach deren Befestigung an der Halterung einschalten – je nachdem, was komfortabler für Sie ist.



Für die Befestigung der Maus Quha Zono X an der magnetischen Halterung, führen Sie sie nahe an die Halterung. Die Magnete werden sie erfassen und automatisch korrekt positionieren. Die

Externer Schalter

Ein externer Schalter mit einem 3,5-mm-Stecker kann für Linksklicks mit der Maus am Kopfband eingesetzt werden. Verbinden Sie den Stecker mit dem Anschluss in der magnetischen Halterung.



Anwendung

Stellen Sie beim Tragen der Quha Zono X mit dem Kopfband sicher, dass sich die Maus Quha Zono X auf der rechten Seite des Kopfes des Benutzers befindet.



Kompatibilität

Das Kopfband für Quha Zono X ist mit der Maus Quha Zono X kompatibel.

Sauberhalten des Kopfbandes für Quha Zono X

Das Kopfband für Quha Zono X lässt sich leicht sauber halten. Die Kunststoffteile des Kopfbandes können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden.

Sicherheit

Das Gerät enthält Magnete. Platzieren Sie sie nicht in der Nähe von magnetisch empfindlichen Elementen, wie zum Beispiel Herzschrittmachern, Hörgeräten, Kreditkarten, mechanische Uhren, Medien zur Datenspeicherung usw., da diese beschädigt werden könnten.



Entsorgung des Produkts

Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, dann sollte es als Elektro- und Elektronikschrott recycelt werden.



EU-Konformität

Der Hersteller dieses Produkts bestätigt, dass dieses Produkt den Richtlinien der Europäischen Union für Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz entsprechen.



Eingeschränkte Garantie

Die Garantie für das Produkt beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiekarte finden Sie in der Verpackung. Lesen Sie die vollständige Garantieerklärung auf unserer Webseite (www.quha.com/warranty).

© 2023 Quha oy. Quha oy is not responsible for possible errors in this user manual. Quha oy reserves the right to revise the content of this user manual.



Designed and manufactured in
Finland by Quha.

www.quha.com

Copyright 2023 Quha oy.

Quha, the Q-mark and Quha Zono X are trademarks or
registered trademarks of Quha oy.